

**Island Home Medical**  
12 Old Schoolhouse Village  
Vineyard Haven, MA 02568  
**24 Hours: 508-693-4380**

**Instruções**  
**Tanque de oxigênio portátil com Conserver**

**O tanque irá fornecer oxigênio para um total de        horas**  
**menos        litros de fluxo.**

**Proibido Fumar**  
**Não chamas**

Processo

- Coloque a tubulação de oxigênio regulador.

Para abrir

- Rodar a alavanca em cima do tanque de ½ volta no sentido horário. A quantidade de oxigênio remanescente no tanque vai ler no indicador. Verifique o conteúdo do tanque antes de cada utilização.
- Definir fluxo de marcação para        litros. Você vai se sentir e ouvir um sopro leve a cada respiração.

Para fechar

- Gire alavanca no sentido horário até que estejam firmes.
- Desligue mostrador preto a 0.

Para substituir tanque vazio

- Tanque de fechar.
- Desligue T preto punho em sentido anti-horário regulador até você é capaz de levantá-regulador.
- Retire a tampa plástica branca fora tanque cheio.
- Regulador de slides sobre a parte superior do tanque, linha de cima, e insira dois pinos nos orifícios correspondentes no tanque.
- Desligue T preto alavanca no sentido horário até que esteja confortável

Para tanques de substituição chamar John Curelli @ 508-693-4380.

Por favor, chame pelo menos 24 horas de antecedência para tanques de ordem.

Coloque as ordens na quinta-feira para a entrega sexta-feira para que você tenha bastante tanques para o fim de semana.